

## Opties en mogelijkheden



### Accu (stand alone)

Voor de situatie waarbij er bijv. gevaar bestaat dat de gebruiker over het snoer kan vallen, is de optioneel te bestellen accu leverbaar. Afhankelijk van het gebruik is de accu dagenlang bruikbaar (ca. 1,5 uur continu). Opladen kan met behulp van de speciale oplaadunit. De accu kan niet geleverd worden in combinatie met RCPM en/of infraroodbediening.

### Beensteun, extra verlengd

Bij activering van de beensteun komt automatisch een extra verlengstuk uit. Het verlengstuk geeft een extra verlenging van ca. 8 cm. De bestaande beensteun blijft tevens op maat instelbaar bij wijziging van de zithoogte. De extra verlengde beensteun is bekleed in Stamskin (zwart), maar kan tegen een meerprijs ook geleverd worden in dezelfde kleur en kwaliteit bekleding van de fauteuil.



### Draaiplateau

Het draaiplateau is o.a. zeer geschikt voor mensen die klein behuïsd zijn, of die vanwege bepaalde ziektebeelden moeilijk hun nek/lichaam kunnen draaien. Het draaiplateau zorgt ervoor dat de fauteuil vrijwel moeiteloos 360 graden kan draaien. In de sta-opstand wordt het draaiplateau automatisch tegen wegdraaien geblokkeerd. Bovendien neemt het weinig ruimte in beslag en kan hiermee in de standaard uitvoering een minimale zithoogte van 41 cm worden bereikt. (Meerprijs dünnere zitting zithoogte 40 cm en 39 cm). Het draaiplateau is niet leverbaar in combinatie met het wielsysteem.



### Elektrisch bedienbare hoofdsteun

Door middel van een extra motor kan de hoofdsteun elektrisch op de juiste stand worden gezet. Een stoel voorzien van deze optie heeft een ander bedieningskastje. De elektrisch bedienbare hoofdsteun is helaas niet mogelijk in combinatie met accu en infrarood handbediening.


### fitMotion automatisch beweegsysteem

fitMotion is een intelligent beweegsysteem voor mensen die veel zitten en bestaat uit 2 verschillende bewegingen: *Pressure Relief* (korte houdingsvariatie in de neutraalstand) en *Slow Motion* (schommelbeweging in de relaxstand). fitMotion activeert de doorbloeding en de zuurstofopname van de huid en werkt ontspannend.

*Pressure Relief*: Wanneer je rechtop zit, met de voeten aan de grond, verstelt fitMotion de stoel iedere minuut enkele graden. Dat gebeurt automatisch, je merkt het nauwelijks maar je zitvlak vaart er wel bij. Door de beweging bouwt zich minder druk op en wordt de doorbloeding en zuurstofopname van de huid geactiveerd.



*Slow Motion*: Wanneer de beensteun in de relaxpositie staat, geeft de stoel elk kwartier - via een trilling - een signaal dat het tijd is om te bewegen. Als je daar niet op reageert, gaat de stoel automatisch in een langzame schommelbeweging. Dit geeft een positief effect op de drukbelasting onder het zitvlak en voorkomt vochtophoping in de onderbenen. Bovendien zorgt deze beweging voor een heerlijk ontspannen gevoel in het hele lichaam.

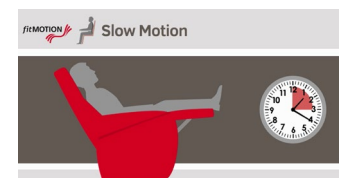



### Handbediening infrarood

De infraroodbediening maakt het mogelijk om de Fitform-fauteuils op afstand te bedienen met een snoerloos bedieningskastje. De bediening moet wel in de buurt van de fauteuil worden gebruikt. Niet mogelijk in combinatie met accu.

### Kussens (zitting)

Fitform heeft de volgende zitkussens in haar collectie:

- Zitting zacht latex < 70 kg lichaamsgewicht;

Hier wordt de standaard vormschuim 9 cm dikke zitting vervangen door een perfolatex (R1 kwaliteit) zitting. Dit is een zeer zacht materiaal. Deze zitting is goed geschikt voor mensen met een laag lichaamsgewicht, maar wel beschikken over wat "zitvlees". Deze zitting is minder goed geschikt voor mensen met uitstekende zitbeenknobbels omdat die door de latex heen kunnen duwen, waardoor deze op de nosagveren van de zittingplaat terecht komen.



- Zitting zacht 70 - 90 kg;

De standaard vormschuim zitting van 9 cm wordt eerst 4 cm dunner gemaakt en daarna voorzien van een zachtere perfolatex toplaag (R1 kwaliteit) van 4 cm. Dit zit iets steviger dan een volledige latex zitting. Men heeft het zachte gevoel van latex, maar door de stevigere ondergrond blijft de zitting langer haar vorm behouden. Deze zitting is met name erg goed geschikt voor mensen met uitstekende zitbeenknobbels of voor mensen met een lichaamsgewicht tussen de 70 en 90 kilogram.



- Fitcomfort zitkussens met traagschuim < 70 kg;

Deze zitting is opgebouwd uit 4 cm Bultex koudschuim en 5 cm traagschuim SG waarde 60. Dit kussen kan ook worden ingezet als preventief anti decubitus zitkussen. Het voelt comfortabel en zacht aan en geeft voldoende steun.



- Fitcomfort zitkussens met traagschuim 70 - 90 kg;

Deze zitting is opgebouwd uit 4 cm Bultex koudschuim en 5 cm traagschuim SG waarde 60. Dit kussen kan ook worden ingezet als preventief anti dcubitus zitkussen.



- Fitcomfort zitkussens met traagschuim > 90 kg;

Deze zitting is opgebouwd uit 4 cm Bultex koudschuim en 5 cm traagschuim SG waarde 1000. Dit kussen kan ook worden ingezet als preventief anti decubitus kussen.



- Zitkussens met Intelli-Gel geïntegreerd;

In het standaard vormschuim zitkussens is het drukverlagende materiaal Intelli-Gel geïntegreerd. Goed tegen decubitus maar ook zeer comfortabel. De drukverlagende eigenschappen van Intelli-Gel komen het beste tot hun recht wanneer de bekledingstof naar beide zijden goed rekbaar is. In het stoffenoverzicht hebben wij voor u de mate van rekbaarheid aangegeven.



### Kussens (hoofdkussens)

Alle hoofd-/nekkussens van Fitform hebben een band waarmee deze over de rugleuning van de stoel kunnen worden gelegd en op de gewenste hoogte kunnen worden gepositioneerd. Ze zijn voorzien van een ritsluiting en van een voorgevormde vulling of los gevuld met fiberfill. De meest gebruikte zijn:

#### -Hoofd/nekkussen 1

Voorgevormd luxe en vol hoofdkussen. Afmeting is ca. 40 cm breed en 22 cm hoog.

#### -Hoofd/nekkussen 3

Dikkere nekrol, gevuld met losse fiberfill vulling. Afmeting is ca. 45 cm breed en 15 cm hoog.

#### -Hoofd/nekkussen 5 druppelvorm

Groot voorgevormd zacht aanvoelend hoofdkussen. Het hoofdkussen heeft een lange band en kan daardoor omgedraaid worden. Geschikt voor mensen met een kyfotisch gegroeide rug. Afmeting is ca. 40 cm breed en 25 cm hoog.

#### -Hoofd/nekkussen 6

Luxe en vol hoofdkussen (als hoofdkussen 1) met losse fiberfill vulling. Afmeting is ca. 40 cm breed en 22 cm hoog.

#### -Hoofd/nekkussen 7 halve maan

Een eenvoudig voorgevormd nekkussen. Afmeting is ca. 35 cm breed en 18 cm hoog.



### Opstaschakelaar


Om het opstaan te vergemakkelijken kan er in diverse modellen een opstaschakelaar worden geplaatst onder de voorzijde van de armleuning van de stoel. Deze eenvoudige schakelaar bedient de sta-opfunctie. Het losse handbedieningskastje hoeft dan tijdens het opstaan niet vastgehouden te worden.



### RCPM zitsysteem

Dit is een zitsysteem waarbij de zitting ter hoogte van de zitbeenknobbels, direct onder de wervelkolom 1 à 2 graden heen en weer beweegt. Deze beweging stimuleert de pompfunctie van de tussenwervelschijven in die mate dat de wervelkolom in lengte toeneemt. Zo wordt passief zitten vanzelf actief zitten en nemen rugklachten af. Minimale zitbelasting (volledig ondersteund en gekanteld) in combinatie met beweging (RCPM) is de best mogelijke zitpositie voor de rug. Mensen met lage rugklachten die meer dan 1 à 2 uur per dag in hun fauteuil zitten, hebben baat bij het RCPM zitsysteem. Bij rugklachten die worden veroorzaakt door bekkeninstabiliteit of door een gebroken wervel, is het RCPM zitsysteem niet aan te raden.

De rotatie onder het zitvlak wordt door een motor tot stand gebracht en is voor de gebruiker niet zichtbaar en nauwelijks hoorbaar. Het mechaniek is voorzien van een aan/uit schakelaar, die te vinden is in één van de opbergetuis van de fauteuil. Wanneer het RCPM-systeem aan staat, beweegt de fauteuil alleen als er iemand in de fauteuil plaatsneemt. Het RCPM zitsysteem is niet leverbaar in combinatie met een accu.

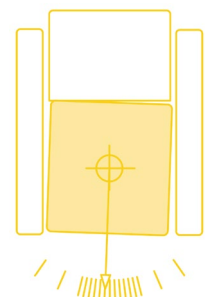

### Smart bediening

Smart bediening biedt een combinatie van persoonlijk zitcomfort, gebruiksgemak en veiligheid. Het is bij uitstek geschikt voor mensen die het prettig vinden dat hun favoriete stoelbewegingen voorgeprogrammeerd zijn, in combinatie met een gemakkelijke handbediening.

Dit biedt Smart bediening:

- Vier verschillende 'op maat' ingestelde bewegingsmogelijkheden afgestemd op wat de gebruiker wenst en nodig heeft.
- De bewegingsmogelijkheden zijn eenvoudig vooraf instelbaar en kunnen op elk moment gewijzigd worden. Dit maakt het mogelijk om optimaal en gemakkelijk in te spelen op veranderende behoeften.
- Een gebruiksvriendelijke handbediening.
- De mogelijkheid tot vergrendeling.



### Topswing rugleuning

Door de rugleuning op hoogte van ongeveer 30 cm van de bovenkant van de fauteuil te buigen, kan de gebruiker zelf de gewenste steun bepalen. De topswing rugleuning heeft zowel naar voren als naar achteren een begrenzing.



### Verstelbare lendensteun

De in hoogte en dikte verstelbare lendensteun bestaat uit een luchtledenpompje dat in hoogte kan worden ingesteld. Achter de rits aan de achterzijde van de fauteuil kan men m.b.v. een knop het ledenpompje in hoogte verstellen. Met behulp van het opblaasbalgje kan men de gewenste dikte van de lendensteun bepalen.

N.B. verstellen is alleen mogelijk als het pompje leeg is.

### Verwarming

Voor de koude wintermaanden is het mogelijk om verwarming te bestellen in de stoel. De zitting en de rugleuning worden voorzien van een verwarmingselement. De verwarming werkt op lage spanning en werkt 20 minuten voordat deze vanzelf uitschakelt. De verwarming is beveiligd tegen oververhitting en voldoet aan alle benodigde veiligheidsnormen. Om de verwarming te bedienen wordt een apart bedieningskastje bijgeleverd. Deze zit standaard aan de andere zijde dan waar het bedieningskastje van de andere stoelfuncties zich bevindt. Verwarming is niet mogelijk in combinatie met accu.



### Wielsysteem met duwbeugel (Mobility Kit)

Met het Mobility Kit wielsysteem is een Fitform 570 Vario-fauteuil gemakkelijk en zonder veel kracht een stukje te verplaatsen met of zonder gebruiker in de fauteuil. Dit systeem is niet ontworpen om mensen over een langere afstand te transporteren. De fauteuil is voorzien van 4 wielen en een duwbeugel. Het wielsysteem kan niet heel gemakkelijk achteraf worden gemonteerd, het is beter dat dit tijdens de productie van de fauteuil gebeurt. Niet mogelijk in combinatie met draaiplateau en bij zitbreedte > 57 cm.



### **Wielsysteem zelfremmend**

Dit wielsysteem maakt het mogelijk om een Fitform 570 Vario- fauteuil onbelast (zonder dat er iemand in zit) gemakkelijk te verrijden.

Door de hendel achter de ritssluiting aan de achterzijde van de rugleuning (waar ook de lendensteun bediend wordt) omhoog te bewegen, komt een subframe met een zwenkwiel op de grond te staan en kan de fauteuil gemakkelijk verreden worden. Wanneer de hendel weer wordt losgelaten wordt het subframe met het zwenkwiel automatisch opgetild, zodat de fauteuil niet meer verrijdbaar is. Doordat de wielen weinig zichtbaar zijn, blijft de vormgeving van de fauteuil optimaal. Niet leverbaar in combinatie met draaiplateau.



### **Zithoogte 38/39 cm**

Bij het realiseren van een zithoogte van 38 of 39 cm, wordt er 2 cm van het zitkussen afgehaald. Deze zithoogten zijn dan ook alleen geschikt voor mensen met een lichaamsgewicht van < 70 kg.

# Wellco<sup>®</sup>

**Wellco International B.V.**

Randweg 17

5683 CL Best

Postbus 247, 5680 AE Best

Tel.: +31 (0)88 - 33 88 100

Fax: +31 (0)88 - 33 88 199

e-mail adres: [info@wellco.nl](mailto:info@wellco.nl)

internetadres: [www.wellco.nl](http://www.wellco.nl)