

1



1

Houd de rugleuning vast en duw de voetsteun naar beneden. U hoort een klik als de rolstoel is vergrendeld.



*Roteer van te voren de arMLEUNINGEN iets omhoog.*

2



2

Plaats de arMLEUNINGEN in de juiste positie.

3



3

Druk beide knoppen in om de gewenste rug-hoek in te stellen.

4



4

Monteer de bedieningsunit met joystick.



Zet de rolstoel aan. De Smart Chair is klaar om u rond te leiden!



*Lees eerst de handleiding voordat u de rolstoel in gebruik neemt.*





1

Zet de rolstoel uit en demonteer de bedieningsunit met joystick.




2

Druk beide knoppen in om de rugleuning naar achteren te klappen.



3

Roteer de armleningen naar achteren en zet de beenbeschermers naar beneden.

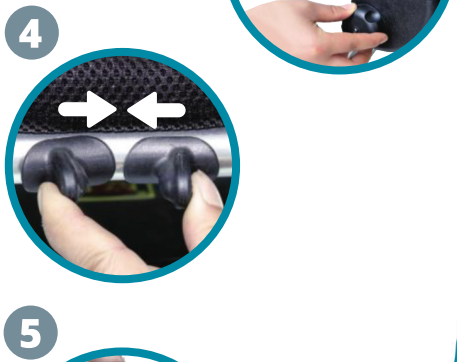

4

Ontgrendel de rolstoel door de schuifstrips op de achterste zittingbuis naar elkaar toe te bewegen.



5

Duw de rugleuning en voetsteun beide richting de zitting.

**!** De rolstoel is pas compleet opgevouwen wanneer u de voetsteun voorbij de weerstand duwt.

**✓** De Smart Chair is nu compact op te bergen. Middels de standaard blijft de vouwrolstoel rechtop staan.

**✓** U kunt de Smart Chair ook als trolley met u mee meerollen.