

gebruikers handleiding BRISKI



lees deze handleiding zorgvuldig voor gebruik van de briski

Technische informatie


Motor	permanent - magneet borstelloze motor
Motor kracht	500W
Batterij	lood accu 4x 12 V 12A
Lader	automaat 48V
Laadtijd	8 uur
Actie radius	25 - 30 km
Max. gewicht	115 kg

WAARSCHUWING


De Briski is geen speelgoed, niet voor kinderen onder de 18 jaar

veiligheids instructie:

- maximum gewicht is 120 kg
- maximaal 1 persoon op de briski
- draag beschermende kleding en helm voor u eigen veiligheid
- voor het rijden controleer dat alle bouten en moeren , vergrendelingen , rem, wielen etc. goed vastzitten en werken.
- bij laden het contact op uit (off)
- niet gebruiken bij hevige regen.
- plaats de briski niet naast warme plekken of vuur.
- de lader niet blootstellen aan water
- controleer of de batterij goed is geïnstalleerd en laadt.
- laadt de batterij na gebruik, eerst laten afkoelen
- laadt batterij pas als er tenminste 10% stroom is verbruikt
- rij op rij op goede ondergrond , vermijdt slecht wegdek en zandwegen.

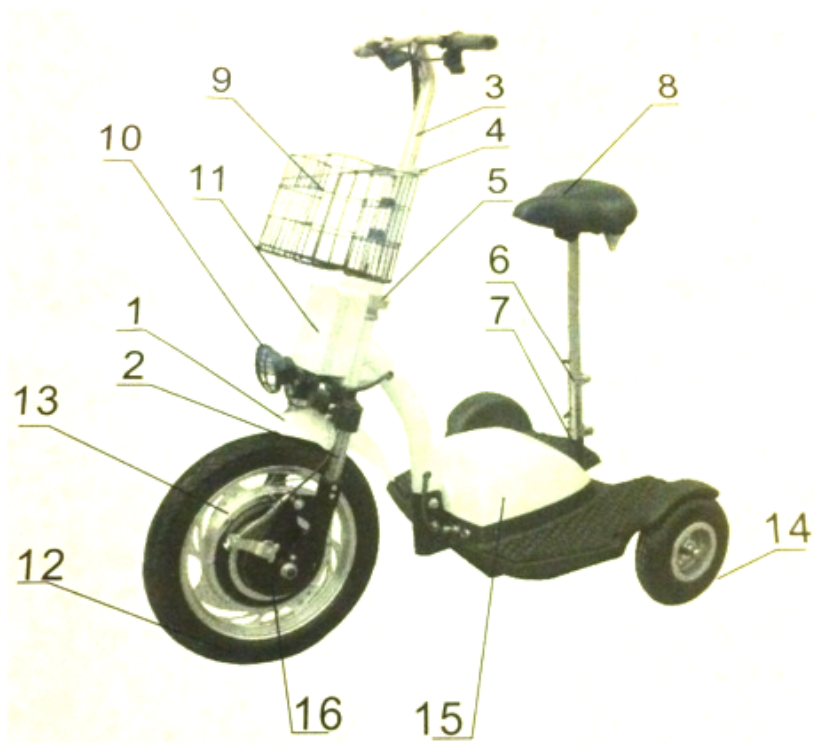

- 1 spatbord
- 2 voorvork
- 3 handvat
- 4 en 5 stuurklemmen
- 6 en 7 zadelpen klemmen
- 8 zadel
- 9 mand
- 10 koplamp
- 11 controller unit
- 12 voorwiel
- 13 motor
- 14 achterwiel
- 15 batterij
- 16 trommelrem
- 17 achterlicht

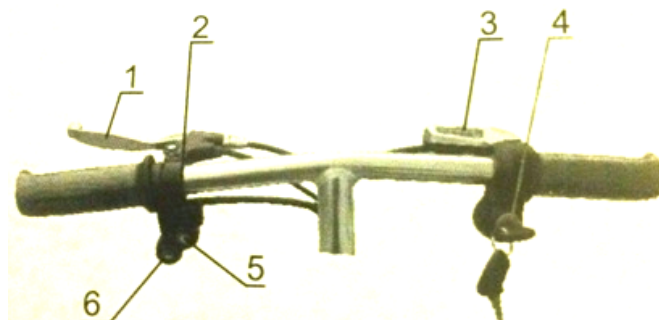

- 1 handrem
- 2 schakelaar links = achteruit
midden = vooruit
rechts = vooruit
- 3 batterij nivo meter
- 4 gashandel met contactslot
- 5 licht
- 6 claxon



lader 48 V loodaccu
gereedschapset

BATTERIJ LADEN

Voor de eerste keer gebruik, de accu volledig opladen
Het laadpunt zit rechts naast het achterlicht.
Eerst lader in laadpunt, dan pas stekker in stopcontact.
Rij de eerste keer de batterij bijna leeg en laad hem volledig op.
Na een paar keer heeft de batterij zijn volledige capaciteit.

Als u de briski niet gebruikt laadt deze dan 1 keer per maand

belangrijk:

Laad de accu niet leeg staan , dit reduceert de levensduur.

RIJDEN VAN DE SCOOTER

Uw dealer / verkoper geeft bij aanschaf uitleg.

VRAGEN ?

Bel uw dealer.