



thuis
Veilig & Actief
traplopen

geschikt voor
bijna alle trappen





“

*Sinds ik de TOPRO Step heb,
ben ik niet meer bang om de
trap te blijven gebruiken.*

Kees (68), gebruikt de
TOPRO Step sinds 2016

*Het is een verschil van
dag en nacht, doordat ik
nog steeds actief blijf.*

Annie (95), gebruikt de
TOPRO Step sinds 2017

Blijf **Actief** en **Zelfstandig**

Voor veel mensen is de trap een uitdaging of obstakel in het dagelijks leven. Toch zijn trappen ook een **effectief middel** om **actief en gezond** te blijven in uw huis. De gevolgen van een val van de trap kunnen ernstig zijn en veel mensen zien er tegenop om de trap te nemen, vooral alleenstaanden. Ieder jaar belanden er 109.000 65-plussers op de Spoedeisende hulp (SEH) na een val.

... met TOPRO Step – De Trap Rollator

TOPRO Step is een **uniek mechanisch trap loophulpmiddel** uit Noorwegen. TOPRO Step bestaat uit een leuning en een handgreep, die langs de leuning wordt geschoven. In geval van duizeligheid of instabiliteit van de benen, ondersteunt de handgreep u tot de volgende stap veilig kan worden genomen. TOPRO Step biedt extra **ondersteuning en veiligheid**, zodat u de trap zelfstandig kunt blijven gebruiken.

Een **stroomaansluiting** is voor de Topro Step **niet nodig** en het is geschikt voor vrijwel **alle soorten trappen**, zelfs voor bijzonder smalle trappen (min. 60 cm).

120 kg

maximaal gebruikersgewicht

Duurzaam

Hoogwaardige materialen, geproduceerd met 100% waterkracht

120–200 cm

aanbevolen lichaamslengte

Modulair systeem

De TOPRO Step-modules worden ter plaatse individueel aangepast.



Een handgreep met veel mogelijkheden ...

TOPRO Step wordt geïnstalleerd op basis van uw lichaamsgrootte en individuele behoeften. De handgreep van de TOPRO Step is **ergonomisch gevormd**, biedt **twee greep hoogtes** en kan gemakkelijk worden gecombineerd met de leuning - zodat iedereen de juiste positie vindt. Test het en ontdek uw voorkeur.



Eén hand

TOPRO Step kan met één hand gebruikt worden, zowel links als rechts, zowel naar boven als naar beneden.



Combineer Handgreep en leuning

Gebruik de leuning voor meer steun en veiligheid wanneer u de handgreep voor u uit schuift.



Pak het verticale deel van het handvat

Bij het afdalen van de trap, sommigen geven er de voorkeur aan het verticale deel van de handgreep te gebruiken.



... en handige opties

De handgreep kan **makkelijk worden ingeklapt** wanneer het niet wordt gebruikt. Dit betekent dat TOPRO Step geen onnodige ruimte op de trap inneemt en anderen niet in de weg zit. Druk eenvoudig op de oranje knop en duw tegelijkertijd de buitenkant van de handgreep naar boven. Om veiligheidsredenen kan de handgreep alleen naar boven worden gevouwen.



Opvouwbaar lichtgewicht

De TOPRO Step-handgreep is opvouwbaar en **weegt slechts 1,3 kg**. Hierdoor is deze met zeer weinig kracht te bedienen.



De knop om weg te vouwen





Tas haak

De apart verkrijgbare tas haken bieden een mogelijkheid aan beide zijden om tassen, jassen en nog veel meer te dragen. (niet inbegrepen in de basisuitvoering)

TOPRO Step – ook voor mijn trap?



Het TOPRO Step systeem bestaat uit een leuning en een handgreep die langs de leuning wordt geschoven. De **leuning**, die uit **afzonderlijke modules** bestaat, kan in lengte en vorm aangepast worden aan **bijna elke trap**, ongeacht de toestand van de muren of de uiteinden van de trap.

De TOPRO Step heeft **geen stroomaansluiting** nodig, **geen bouwvergunning** en geen ingreep in de structuur van het gebouw. TOPRO Step is niet alleen geschikt voor binnen, maar ook voor overdekte buitenruimtes.

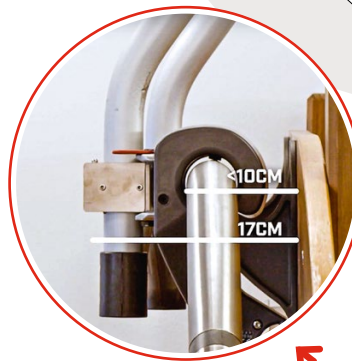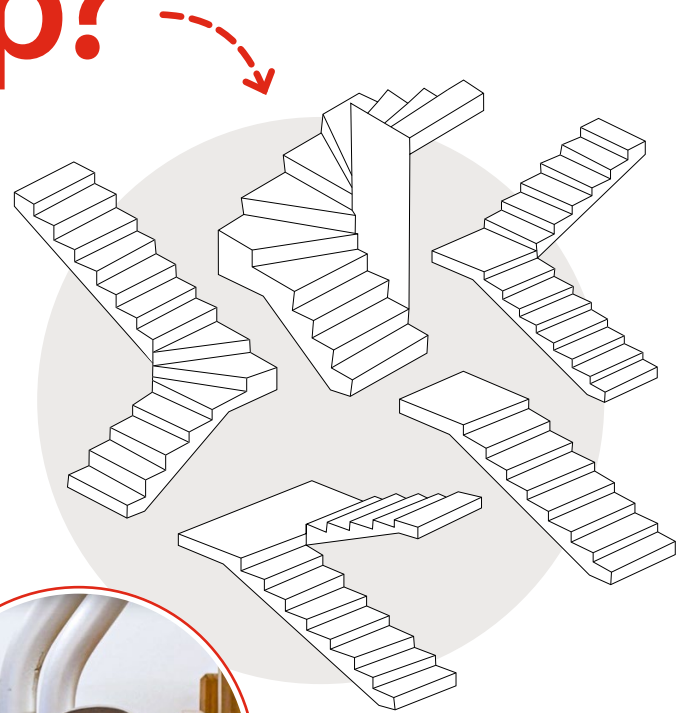

Zeer geringe montagediepte

De leuning komt slechts 10 cm van de muur af en de gevouwen handgreep ook maar ongeveer 17 cm.

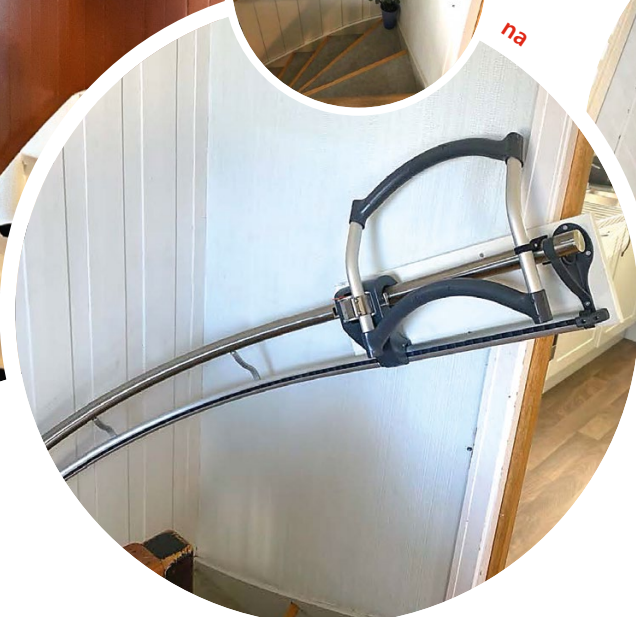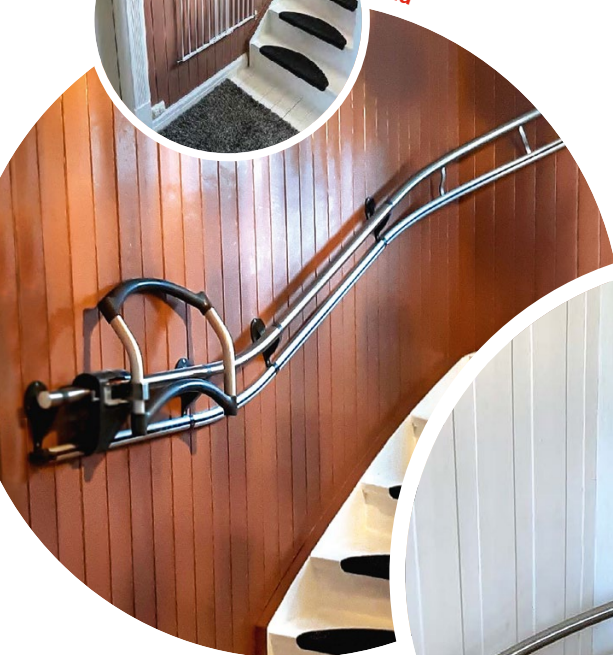

Laat u inspireren door onze installatievoorbeelden ...

Barrière vrij voor iedereen

Het **slanke, elegante ontwerp** van de TOPRO Step zorgt er tevens voor dat de trap óók voor de **partner, mantelzorgers** en/of **hulpdiensten** beter en veilig begaanbaar blijft.

Bij de TOPRO Step blijft óók het brede gedeelte van de traprede gewoon begaanbaar en blijft tevens de **funktie** van de **trapleuning behouden**.

Wel zo praktisch en veilig voor iedereen! Extra veilig is tevens dat de **vluchtroutes** volledig vrij blijven in het geval van een noodsituatie.




Gebruikt door **groot** en **klein**



TOPRO Step is geschikt voor gebruikers van alle leeftijden. Senioren, kinderen, beroerte patiënten, mensen die een val hebben meegemaakt, of lijden aan neurologische ziekten of kanker – alle gebruikers hebben één ding gemeen: ze hebben steun en veiligheid nodig om zelfstandig trap te kunnen lopen.



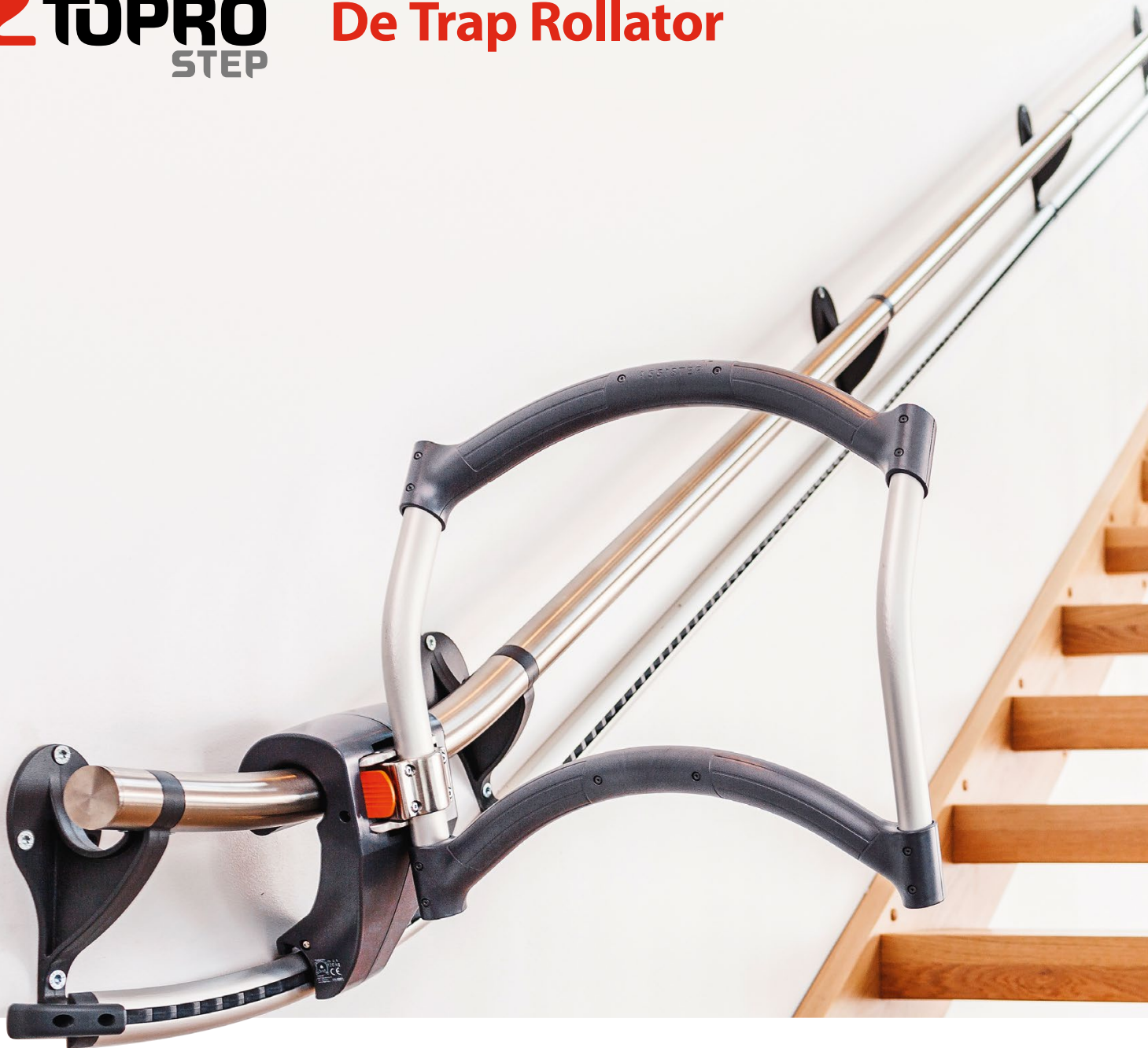

Verkoop:



Topro Mobility BV
C'park Bata – Gebouw 21, unit 2.17
Europaplein 1
5684 ZC Best
Telefoon: 0800 – 6050
E-mail: info@topromobility.nl

Meer weten



TOPRO Step

Uw verkooppartner / dealer:

Alle afbeeldingen, afmetingen en prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Spelingen, kleurafwijkingen en innovaties in het kader van de technische uitvoering kunnen niet worden uitgesloten.

www.toprostep.nl
www.topromobility.nl

TOPRO Step ook in uw buurt



Heeft nog meer vragen?

Wij **adviseren** u graag!



Ontwerp en fabricage in Noorwegen. TOPRO staat voor kwaliteit en biedt tot 5 jaar uitgebreide garantie.

